

Ohříváček Sissel HydroTemp

Návod k použití

Přiložte ohříváček přímo na kůži nebo použijte tenkou mezivrstvu. Přizpůsobí se tvaru těla a teplo vydává až 30 minut.

Jak ohřát:

v mikrovlnné troubě 60 sec na 600 - 800W. Pro zvýšení účinku ohřejte ještě 2-3x po 20 sec. (max. tedy 120 sec.).

Znovu aplikujte nejdříve za 2 hodiny.

Nemyjte ani neoplachujte ve vodě. Otírejte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte na otevřené rány. Neaplikujte na malé děti.

TEJPY.cz s.r.o. www.tejpy.cz